

瀚德凯尔为萨瓦瑞亚集团旗下子公司,萨瓦瑞亚集团是全球无障碍通行领域的领军企业,专注于打造家庭及户外个人通行生活方式。

我们提供产品设计、制造和安装一条龙服务,旨在使人们在生活、工作和娱乐的场所更好实现无障碍通行。我们的全球总员工数量超过2,300名,每一名员工均认识到,自己的工作会给人们的生活带来积极、实质性的改变。能够直接或间接通过值得信赖的国际合作伙伴网络,竭尽全力服务每一位客户,我们深感自豪。

瀚德凯尔深耕电梯行业100余年,以产品创新和优质服务享誉盛名。我们设计并制造适用于室内和室外的直线型和曲线型座椅电梯,产品覆盖全球40多个国家。



家位于北美、欧洲和中国的制造工厂

在全球设有超过

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


个销售办事处



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情

您身边的瀚德凯尔认证合作伙伴:



www.savaria.cn
生产地址:
福建省厦门市海沧区东孚大道2881号15号
厂房4-5层东侧

办事处:
中国福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室
电话:+86 592 6038 779
邮箱:contactasia@savaria.com



* 注意,实际颜色可能与显示的颜色略有不同。所有信息均秉承诚信善意原则提供,但无法对此做出保证。瀚德凯尔保留更改设计和规格的权利,如有变化恕不另行通知。

4000 曲线型座椅电梯



设计升级

结实可靠 功能多样的 双轨系统

4000曲线型座椅电梯采用最新技术,确保了稳定性和可靠性,为用户提供顺畅的乘运体验。

我们为您定制打造的双轨系统,能完美适配您的楼梯,并提供一系列根据您的需求定制的自动化选项。

4000型座椅电梯可提供几乎是市场上最紧密的弯曲轨道,是螺旋楼梯或曲线型楼梯以及狭窄走廊的理想之选。



最佳匹配 根据您的楼梯 量身定制


瀚德凯尔 (Handicare) 开发了一套先进的数字楼梯测量系统,名为PhotoSurvey 4D。通过这个系统,我们在您的居所进行实地查看时,可以100%快速准确地测量楼梯、走廊和平台尺寸,而您无需承担任何义务。请放心选择我们的新型座椅电梯,它将与您楼梯尺寸完美匹配。

我们所有认证过的合作伙伴都将使用PhotoSurvey 4D,整个测量过程最快仅需10分钟!



出色的户外 性能

为了确保能在室外长久耐用,我们对椅套的防紫外线材料进行了升级,使用了Smart Slate,同时还配备了防水罩(IP44级别),以提供额外的保护。

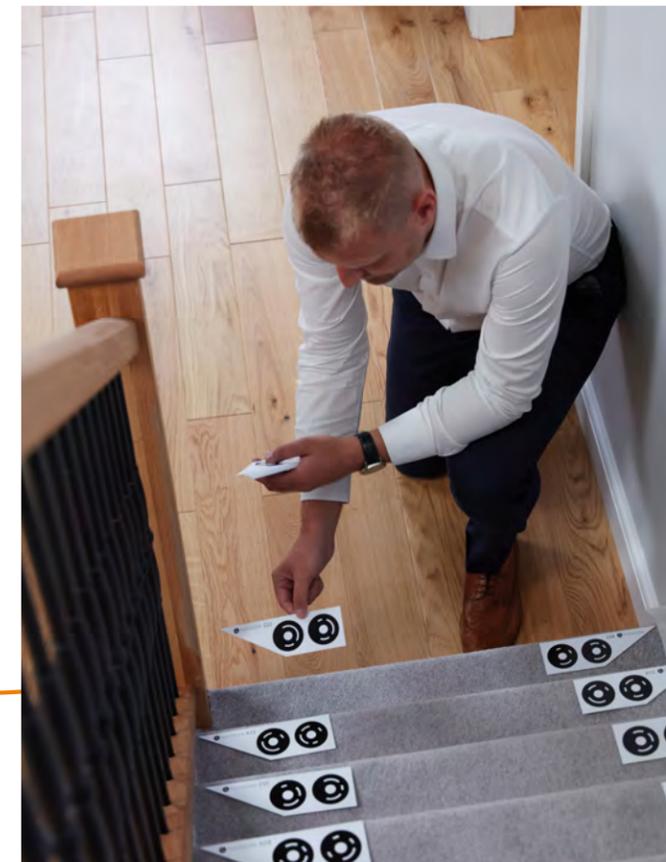

让4000型座椅电梯成为您的专属电梯

4000型座椅电梯提供多种颜色和座椅选项,可根据您的家居装饰风格和个人喜好进行定制,可选择布料或人造皮革材质。我们的所有座椅设计都追求品质舒适体验,可以整齐折叠,为楼梯其他使用者留出足够的空间。



时尚款



智能款



智能高脚款



简约款*



轨道颜色



*简约款座椅为标配



简单易用



扫描二维码观看我们的视频,了解如何使用4000型座椅电梯

定制



定制符合您当下和未来需求的电动选项,轻松享用升级版电梯。可选择电动座椅旋转功能、电动折叠脚踏板和电动折叠铰链

小巧



可将暂未使用的电梯折叠起来,为楼梯腾出更多空间。铰链式轨道可以为较低楼层提供畅通无阻的通道

安全




可伸缩安全带、紧急停止和安全传感器

载重量



有136公斤或160公斤两种载重量可供选择,外观同样美观。

节能环保


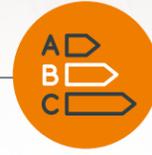


运行成本低,电池可在停电时保持电梯正常工作

Handicare 4000时尚款

A	标准转弯半径 短款扶手	735毫米 700毫米
B	座椅靠背到墙壁的最小距离	110毫米
C	座椅深度	390毫米
D	折叠时脚踏板到墙的最小距离	405毫米
E	展开时标准脚踏板边缘到墙的最小距离 选型款小脚踏板边缘到墙的最小距离 选型款偏移脚踏板边缘到墙的最小距离	695毫米 635毫米 655毫米
F	扶手宽度 - 外侧	585毫米
G	扶手宽度 - 内侧	430毫米
H	靠背高度	400毫米
I	脚踏板到座位高度	470-550毫米
J	脚踏板最低高度	70毫米*
轨道嵌入楼梯的最小距离		125毫米
标准限重		136公斤
重型版限重		160公斤
速度		0.12米/秒 (约值)
最大楼梯角度		56度

*在水平平台条件下

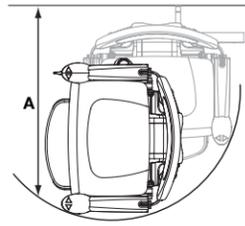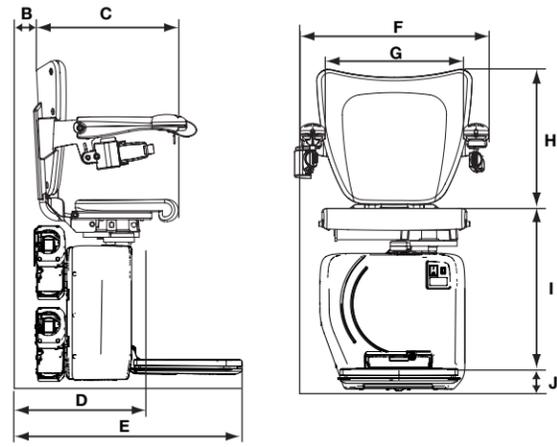



以上某些尺寸取决于住宅中楼梯的特点。有关这些尺寸和座椅功能的更多信息，请参阅销售手册。所有信息均秉承诚信善意原则提供，但无法对此做出保证。瀚德凯尔保留更改设计和规格的权利，如有变化恕不另行通知。

Handicare 4000高脚款

A	最小转弯半径 短款扶手	- -
B	椅背内侧到墙的距离	130毫米
C	座椅深度	247毫米
D	折叠时脚踏板到墙的最小距离	405毫米
E	展开时脚踏板边缘到墙的最小距离	695毫米
F	扶手宽度 - 外侧	530-630毫米
G	扶手宽度 - 内侧	410-510毫米
H	靠背高度	455毫米
I	脚踏板到座位高度	625-750毫米
J	脚踏板最低高度	70毫米*
轨道嵌入楼梯的最小距离		125毫米
标准限重		136公斤
速度		0.12米/秒
最大楼梯角度		56度

*在水平平台条件下



以上某些尺寸取决于住宅中楼梯的特点。有关这些尺寸和座椅功能的更多信息，请参阅销售手册。所有信息均秉承诚信善意原则提供，但无法对此做出保证。瀚德凯尔保留更改设计和规格的权利，如有变化恕不另行通知。

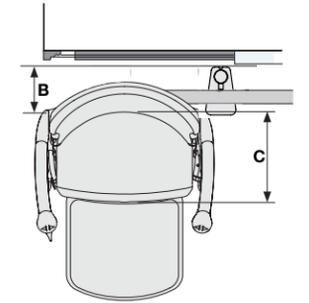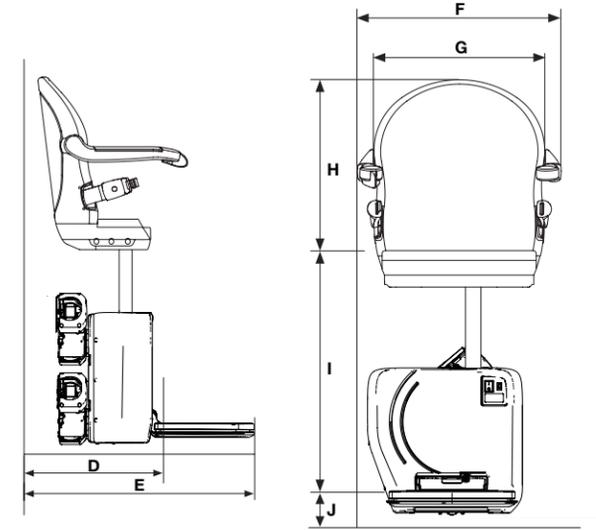

Handicare 4000智能款

A	最小旋转半径 短款扶手	700-750毫米 -
B	墙壁到内侧椅背距离	130毫米
C	座椅深度	360-425毫米
D	折叠时脚踏板到墙的最小距离	405毫米
E	展开时标准脚踏板边缘到墙的最小距离 选型款小脚踏板边缘到墙的最小距离 选型款偏移脚踏板边缘到墙的最小距离	695毫米 635毫米 655毫米
F	扶手宽度 - 外侧	530-630毫米
G	扶手宽度 - 内侧	410-510毫米
H	靠背高度	455毫米
I	脚踏板到座位高度	490-590毫米
J	脚踏板最低高度	70毫米*
轨道嵌入楼梯的最小距离		125毫米
标准限重		136公斤
重型版限重		160公斤
速度		0.12米/秒
最大楼梯角度		56度

*在水平平台条件下

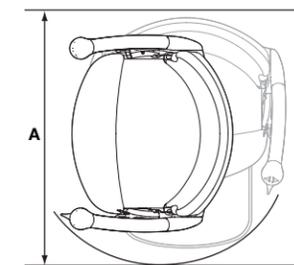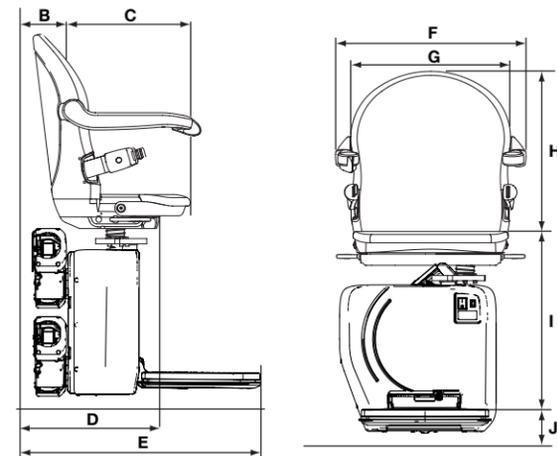

以上某些尺寸取决于住宅中楼梯的特点。有关这些尺寸和座椅功能的更多信息，请参阅销售手册。所有信息均秉承诚信善意原则提供，但无法对此做出保证。瀚德凯尔保留更改设计和规格的权利，如有变化恕不另行通知。

Handicare 4000简约款

A	标准转弯半径 短款扶手	735毫米 700毫米
B	椅背到墙的最小距离	110毫米
C	座椅深度	390毫米
D	折叠时脚踏板到墙的最小距离	405毫米
E	展开时标准脚踏板边缘到墙的最小距离 选型款小脚踏板边缘到墙的最小距离 选型款偏移脚踏板边缘到墙的最小距离	695毫米 635毫米 655毫米
F	扶手宽度 - 外侧	585毫米
G	扶手宽度 - 内侧	430毫米
H	靠背高度	400毫米
I	脚踏板到座位高度	470-550毫米
J	脚踏板最低高度	70毫米*
轨道嵌入楼梯的最小距离		125毫米
标准限重		136公斤
重型版限重		160公斤
速度		0.12米/秒 (近似值)
最大楼梯角度		56度

*在水平平台条件下

以上某些尺寸取决于住宅中楼梯的特点。有关这些尺寸和座椅功能的更多信息，请参阅销售手册。所有信息均秉承诚信善意原则提供，但无法对此做出保证。瀚德凯尔保留更改设计和规格的权利，如有变化恕不另行通知。

